



FORUM de ZEISS

Más que gestión de datos



We make it visible.


El momento en el que la gestión de datos oftalmológicos
le da más tiempo para atender a sus pacientes.

Nosotros trabajamos para este momento.

// EFICIENCIA CLÍNICA
MADE BY ZEISS

Bienvenido

a su nuevo mundo de datos clínicos

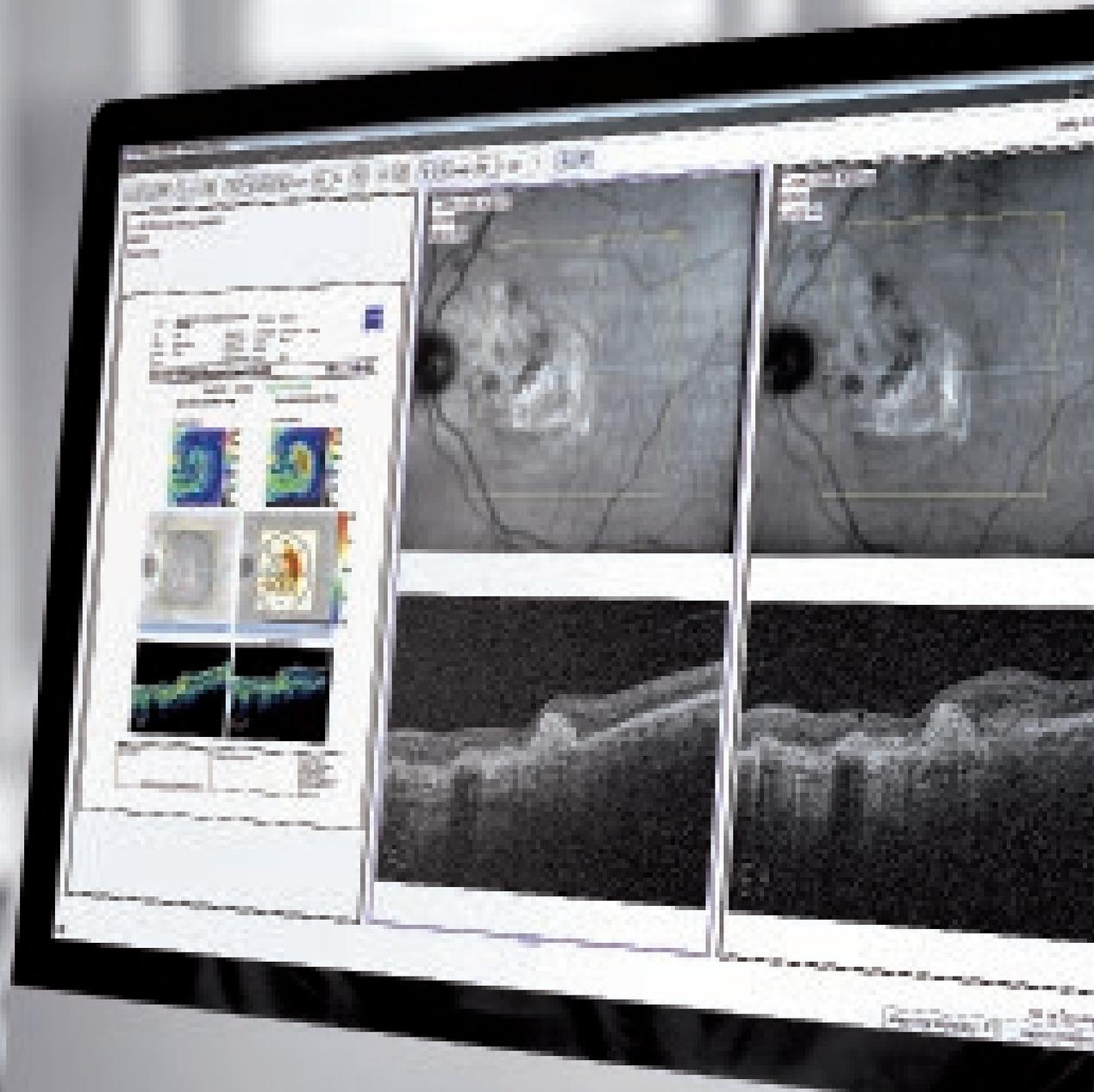



FORUM de ZEISS – el excepcional software de trabajo y consulta para oftalmólogos

Nuestra solución de gestión de datos le ofrece las herramientas adecuadas para llevar a cabo análisis clínicos, diagnósticos fiables y procesos eficientes.

A partir de ahora, tendrá todos los datos de los exámenes disponibles al instante al alcance de su mano, actualizados y sin papel.

ZEISS FORUM

Agilice su flujo de trabajo



Solicitar exámenes

No hacen falta más que dos clics. El examen puede solicitarse, p. ej., en el mostrador de recepción y se transfiere electrónicamente con los datos del paciente a los instrumentos de diagnóstico. FORUM® de ZEISS también puede conectarse a su registro médico electrónico. Por tanto, los datos del paciente solo hay que introducirlos una vez. **De esta forma se ahorra tiempo y se asegura la coherencia en los registros de pacientes.**



Capturar datos

Todos los exámenes solicitados se muestran en la lista de trabajo del instrumento. El operador simplemente selecciona el paciente en la lista de trabajo y queda libre para concentrarse en el examen. Ya no es necesario introducir datos del paciente en el instrumento. Con un simple clic, los datos se almacenan de forma centralizada en ZEISS FORUM. **Esto le permite al operador centrarse en el paciente durante los exámenes.**



Verlo todo de un vistazo

ZEISS FORUM pone al alcance de su mano todo el historial de exámenes del paciente. El intuitivo Viewer permite consultar, comparar y analizar los datos de diagnóstico de diferentes instrumentos y exámenes anteriores. Ya se encuentre en la consulta o en un lugar remoto, ZEISS FORUM le proporciona lo que necesita para evaluar cada caso con fiabilidad e informar a sus pacientes.

Esto le ayuda a tomar la decisión correcta basándose en toda la información que tiene a su disposición.

ZEISS FORUM

Centre sus evaluaciones en lo importante



Pantalla clínica: progresión de la DMAE

Usted necesita tiempo para ser preciso. Y su tiempo es muy valioso para los pacientes. ZEISS FORUM le ayuda a ahorrar tiempo con "pantallas clínicas" preconfiguradas que proporcionan una visión de conjunto de los datos más importantes con un solo clic. Existen diferentes "pantallas clínicas", como una vista de progresión de casos de DMAE donde se alinean automáticamente sucesivos exámenes de mácula. El hecho de tener los resultados relevantes a la vista le permite ser más rápido y centrarse en sus evaluaciones.



Pantalla clínica: cataratas

ZEISS FORUM visualiza datos médicos de varias formas que le ayudan a tomar decisiones acertadas.

La "pantalla clínica" para casos de cataratas muestra automáticamente la topografía corneal de un paciente, sus exámenes de mácula y de biometría, ayudándole así a elegir el tratamiento correcto.



ZEISS FORUM Glaucoma Workplace

ZEISS FORUM Glaucoma Workplace es una aplicación que brinda acceso a demanda a los historiales de exámenes de sus pacientes. La función interactiva Guided Progression Analysis (GPA) es una herramienta especialmente valiosa. Le permite concentrarse con rapidez y seguridad en cómo está evolucionando el estado del campo visual de un paciente. La combinación automática de datos de campo visual y OCT redondean esta valiosa aplicación.

ZEISS FORUM

Gestione sus datos

ZEISS FORUM se integra a la perfección en su entorno de TI

ZEISS FORUM ofrece la solución adecuada para cada consulta y entorno clínico: al basarse en el estándar industrial DICOM, la compatibilidad con instrumentos de otros fabricantes queda asegurada, ahora y en el futuro. La compatibilidad con el estándar HL7 y otras interfaces permiten la integración con sistemas de información hospitalaria y registros médicos electrónicos creando una consulta totalmente integrada y sin papel. ZEISS FORUM garantiza que sus datos de examen se archiven de forma segura y accesible donde y cuando los necesite.

Recepción



ZEISS FORUM complementa los registros médicos electrónicos (EMR) y los sistemas de información hospitalaria incorporando el análisis y una gestión de imágenes y de datos de examen. ZEISS FORUM ofrece interfaces para transferir datos a y desde esos sistemas.

Instrumentos de diagnóstico (DICOM)



ZEISS FORUM se conecta y comunica con instrumentos de diagnóstico empleando el estándar industrial DICOM. Lo cual ofrece numerosas ventajas como, p. ej., compatibilidad tanto con instrumentos de ZEISS como con una extensa gama de instrumentos de otros fabricantes. DICOM también se asegura de que los datos de los pacientes no se extravíen y que se mantenga coherencia en los registros de pacientes.


Incluso se pueden conectar instrumentos que no sean DICOM a través de ZEISS FORUM LINK Tools, de tal forma que aún se pueden aprovechar las ventajas de DICOM convirtiendo al formato DICOM, p. ej., imágenes JPG, informes PDF o una señal de puerto de impresora de un instrumento.




Instrumentos de diagnóstico
(no DICOM)

Consulta

ZEISS FORUM Viewer App

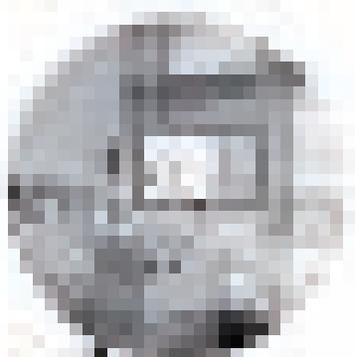

ZEISS FORUM

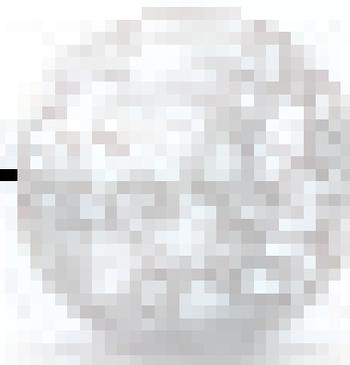

Todos los datos de examen se guardan de manera centralizada en ZEISS FORUM Archive y puede accederse inmediatamente a ellos desde donde se necesiten: en las consultas, local o remotamente, o desde el iPad® con la aplicación móvil FORUM Viewer App. Incluso en el quirófano puede acceder a sus exámenes de biometría de IOLMaster a través del sistema de soporte quirúrgico CALLISTO eye.

Quirófano

Consulta en remoto

**ZEISS FORUM:
la forma segura y eficiente
de gestionar sus datos.**



**Explore
otros complementos de
de la familia ZEISS FORUM**

FORUM GO

Paquete de software de trabajo y consulta para clínicas medianas y pequeñas

FORUM Glaucoma Workplace

Análisis ampliados para la gestión del glaucoma

FORUM ASSIST match

Identificación rápida de incoherencias en los registros de pacientes

FORUM LINK Tools

Para la integración de instrumentos que no sean DICOM

FORUM Viewer App


Consulte los datos del paciente siempre que lo necesite

Servicios de TI profesionales

Asistencia óptima desde la implementación hasta la puesta en marcha

ZEISS FORUM GO


Nuestra atractiva oferta básica –
preinstalada y lista para funcionar

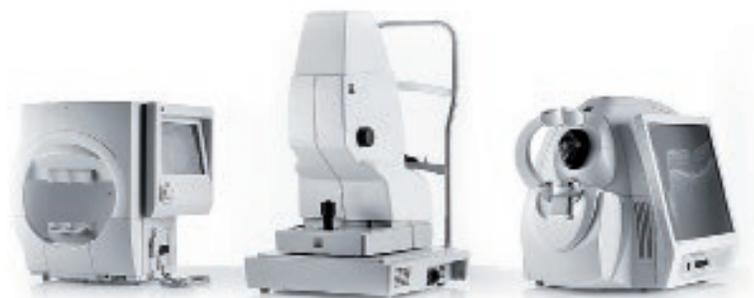


El paquete de software de trabajo y consulta para clínicas medianas y pequeñas que están buscando un camino fácil para unirse al mundo de la gestión electrónica de datos para la oftalmología. Instalado y listo para funcionar en un nuevo ordenador con pantalla moderna HD de 23". FORUM GO® de ZEISS vincula tres instrumentos de diagnóstico y proporciona acceso a todos los datos de examen procedentes de hasta tres estaciones de trabajo al mismo tiempo.

ZEISS FORUM GO glaucoma incluye además la aplicación de software FORUM Glaucoma Workplace.

Los paquetes de ZEISS FORUM GO pueden extenderse a la completa solución de gestión de datos ZEISS FORUM, que le permite integrar más instrumentos de ZEISS o de otros fabricantes y agregar más estaciones de visualización.

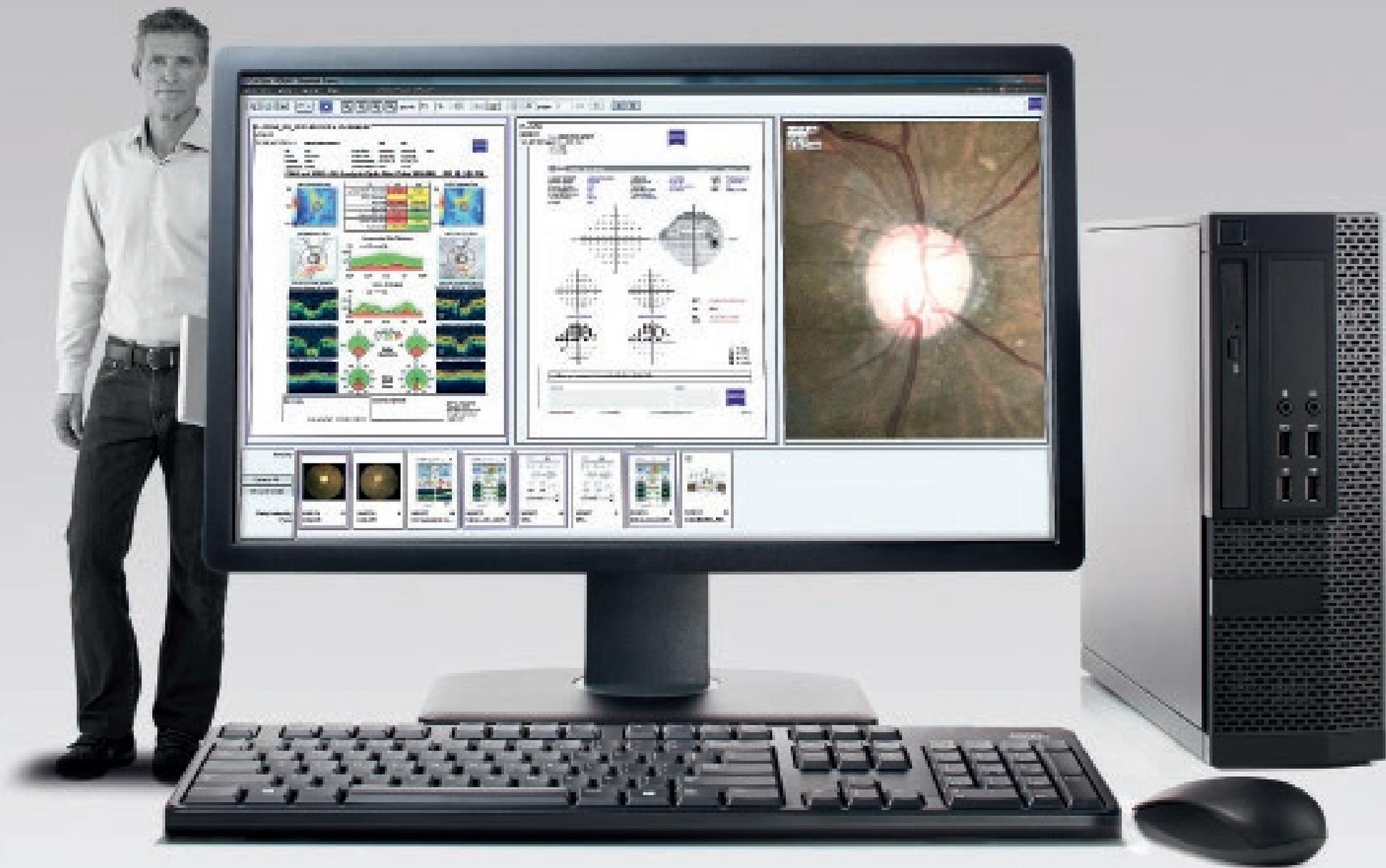


ZEISS FORUM Glaucoma Workplace

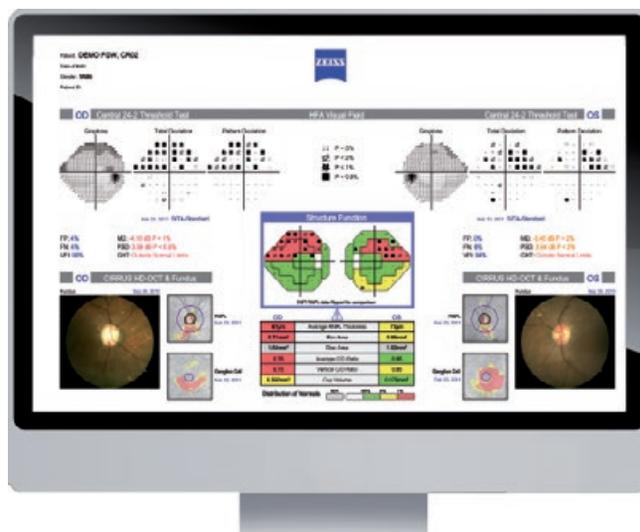


ZEISS FORUM Glaucoma Workplace es una aplicación clínica con la que puede analizar datos de HFA™ directamente desde su escritorio. Le permite tomar decisiones fundadas y seguras. Gracias a la función Guided Progression Analysis (GPA), tiene a su alcance el historial de exámenes completo de un paciente. Puede determinar más fácilmente el índice con el que se reduce el campo de visión del paciente y actualizar interactivamente los análisis de tendencia.

Esto resulta útil al iniciar un tratamiento o cuando necesita una referencia actual.

Además, puede fusionar automáticamente los datos HFA y OCT de CIRRUS en un "informe combinado" para facilitar la evaluación. Si estaba esperando la llegada de una herramienta intuitiva y transparente para visualizar todos los datos estructurales y funcionales, ZEISS FORUM Glaucoma Workplace es la aplicación adecuada para sus necesidades.

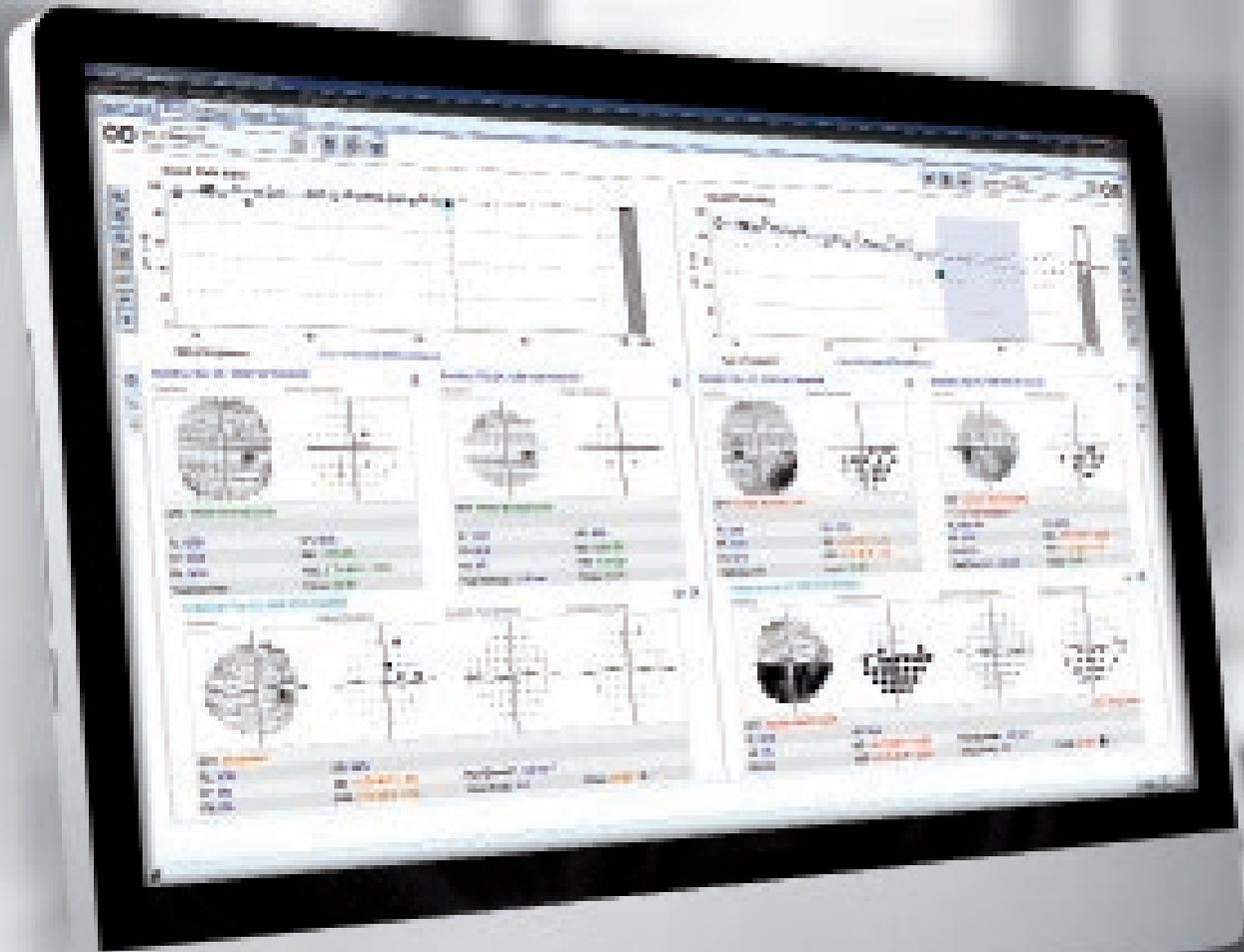

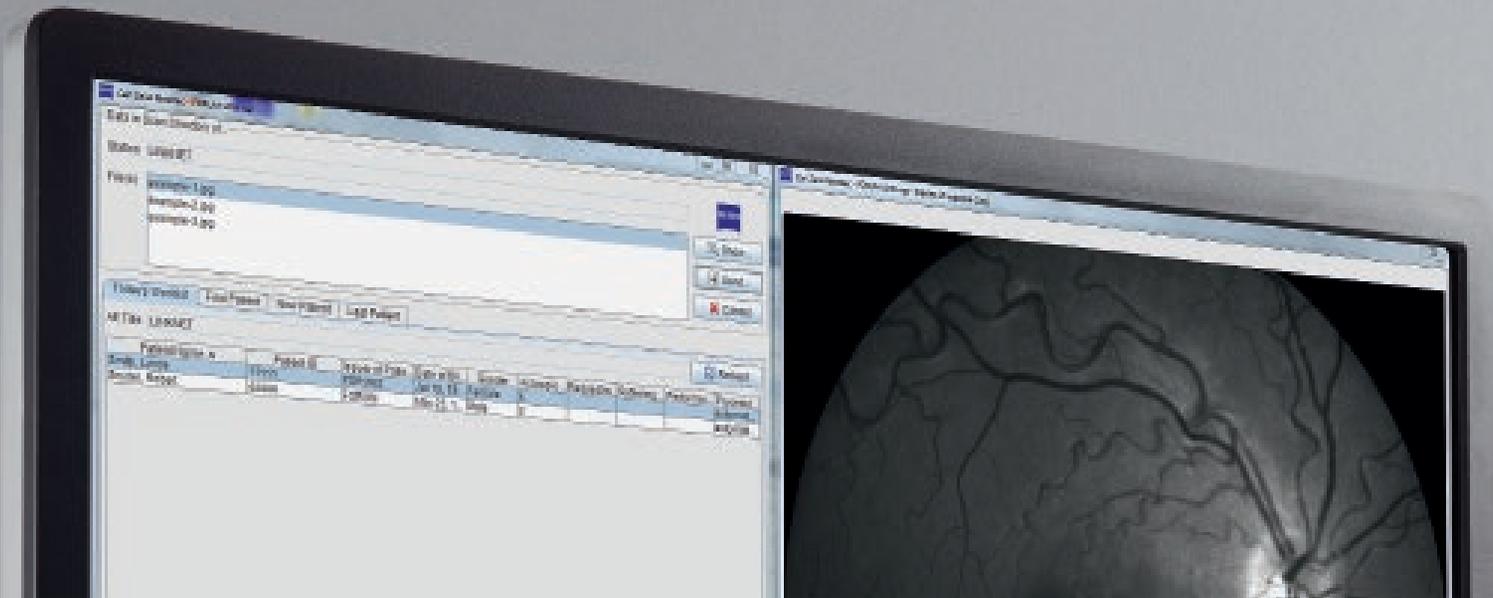

ZEISS FORUM LINK Tools

Para conectar dispositivos que no sean DICOM

Cada vez son más los oftalmólogos que se pasan a la gestión digital de sus datos de diagnóstico. Hasta ahora, sin embargo, solía resultar imposible conectar dispositivos debido a la falta de una red o de una interfaz que cumpla la norma DICOM. ZEISS FORUM LINK Tools le permite integrar instrumentos que antes no podían estar conectados en red porque no cumplían la norma DICOM, independientemente de su fabricante. Estas herramientas incluso le permiten realizar planificaciones en esos instrumentos utilizando los datos demográficos del paciente guardados en ZEISS FORUM.

ZEISS FORUM LINK net. Esta aplicación le permite conectar directamente a ZEISS FORUM dispositivos que no sean DICOM. Los datos obtenidos se convierten en archivos DICOM que se pueden importar sin problema a nuestra solución de gestión de datos.

ZEISS FORUM LINK port. Esta aplicación le permite conectar a ZEISS FORUM los instrumentos que no están conectados a la red. La herramienta captura los datos desde el puerto paralelo de impresora del instrumento y los convierte en archivos DICOM. Y después los transfiere y guarda en el archivo central.

Status	Last Name	First Name	Patient ID	Issuer of Patient ID	Gender	Date of Birth
	Smith	Linda	11111	FORUM	Female	10/11/1964
	Smith	Linda	22222	FORUM	Female	10/11/1964
	Smith	Linda	11111	FORUM	Female	10/11/1964
	Snyder	Robert	44444	FORUM	Male	05/20/1968
	Snyder	Robert	33333	FORUM	Male	05/20/1968
	Snyder	Bob	33333	FORUM	Male	05/20/1968

ZEISS FORUM ASSIST match

Evite faltas de ortografía en los datos de sus pacientes

¿Su apellido es Giménez, Jiménez o Ximénez? Los nombres de los pacientes pueden escribirse incorrectamente. Y al migrar datos heredados de diferentes instrumentos de diagnóstico, aparecen duplicaciones debido a que el nombre del paciente se ha escrito de manera distinta o a que se han copiado incorrectamente identificaciones de paciente. Nadie quiere tener ese tipo de irregularidades en su base de datos. Impiden trabajar de forma rápida y precisa.

Pero pueden y deben eliminarse. Con esta finalidad hemos desarrollado ZEISS FORUM ASSIST match.

Es un programa muy eficaz que localiza los registros duplicados del mismo paciente que se guardan en ZEISS FORUM Archive.

Después de una exploración exhaustiva de todos los archivos del paciente, corrige las incoherencias y las presenta en una lista para su confirmación. Esto supone un considerable ahorro de tiempo y dinero comparado con una búsqueda manual. Incluso puede definir sus propios criterios de búsqueda.

ZEISS FORUM ASSIST match. El señor Giménez siempre será el señor Giménez.



ZEISS FORUM Viewer App

Consulte los datos del paciente siempre que quiera

ZEISS FORUM Viewer App para iPad® le permite visualizar y acceder de forma flexible a los datos y registros del paciente almacenados en ZEISS FORUM Archive, tal y como lo necesite. Amplía además las opciones de ZEISS FORUM y le permite previsualizar los datos de los exámenes cuándo y dónde lo desee antes de ver a un paciente. Puede visualizar los resultados durante una consulta del paciente, discutir un caso con otro médico o consultar los resultados de los exámenes y los informes desde cualquier ubicación.



Servicios de TI profesionales de ZEISS

Después de introducir una solución ZEISS FORUM, es posible que los clientes dispongan de datos heredados de pacientes que ahora deban estar disponibles o tengan la necesidad de conectar a ZEISS FORUM otro sistema informático para optimizar el flujo de datos de sus pacientes.

Los servicios de TI profesionales de ZEISS cubren todo tipo de servicios al cliente tales como:

- Servicios de integración de sistemas, p. ej, la integración de ZEISS FORUM con sistemas de terceros
- Servicios de migración y limpieza de datos que se encargan de sus datos heredados y los ponen a su disposición en ZEISS FORUM
- Servicios de gestión de proyectos, como la introducción e interacción de ZEISS FORUM en un gran entorno hospitalario.

Por otro lado, ZEISS ofrece contratos de servicio de TI de OPTIME que abarcan una gama completa de ofertas de servicio para garantizar la máxima vida útil del sistema y un flujo de trabajo a su medida. Las funciones como la línea de atención telefónica local, las actualizaciones de software y la asistencia remota le permiten centrarse siempre en lo que mejor hace: ocuparse de sus pacientes.

CE 0297 (FORUM Archive,
FORUM Archive & Viewer, FORUM Viewer
App, FORUM Glaucoma Workplace)



Carl Zeiss Meditec AG
Goeschwitzer Strasse 51-52
07745 Jena, Alemania
www.meditec.zeiss.com/contacts
www.meditec.zeiss.com/forum



Escanee el código QR con su
smartphone y obtenga más
información del producto.
Para obtener más información visite:
www.meditec.zeiss.com/forum

ES_31_200_00101 Impreso en Alemania, CZ-VI/2014
Edición internacional: No apto para su venta en Estados Unidos. Puede que el contenido de este folleto no se corresponda con el estado actual de aprobación del producto en su país. Póngase en contacto con su representante local para obtener más información. El diseño y el alcance de suministro están sujetos a posibles cambios en aras del desarrollo técnico actual. FORUM, CIRRUS, HFA y Guided Progression Analysis (GPA) son marcas comerciales o marcas registradas de Carl Zeiss Meditec AG. Carl Zeiss Meditec AG no es el fabricante legal de los componentes de hardware de FORUM GO que aquí se describen.
© 2014 by Carl Zeiss Meditec AG. Todos los derechos reservados.