


samaritan® PAD 360P

Desfibrilador de acceso público totalmente automático

Tecnología compacta y fácil de usar que salva vidas

El paro cardíaco súbito (PCS) es una de las principales causas de muerte en todo el mundo. El uso de un DEA puede aumentar el índice de supervivencia de 5% hasta 70%, siempre que se use dentro de los primeros minutos siguientes al PCS.

Los sofisticados desfibriladores de acceso público de la familia samaritan® PAD fueron diseñados especialmente para uso en áreas públicas, tanto para adultos como para niños, son livianos y tienen un sistema fácil de operar. El samaritan PAD 360P, que ofrece todas las funciones esenciales de la familia de productos samaritan PAD, es un desfibrilador totalmente automático diseñado para analizar el ritmo cardíaco y administrar automáticamente una descarga eléctrica capaz de salvarle la vida al paciente (si fuera necesario). Además, el SAM 360P incluye una función de detección de movimiento para alertar a los usuarios si se está ejerciendo movimiento excesivo o imprevisto sobre el paciente.

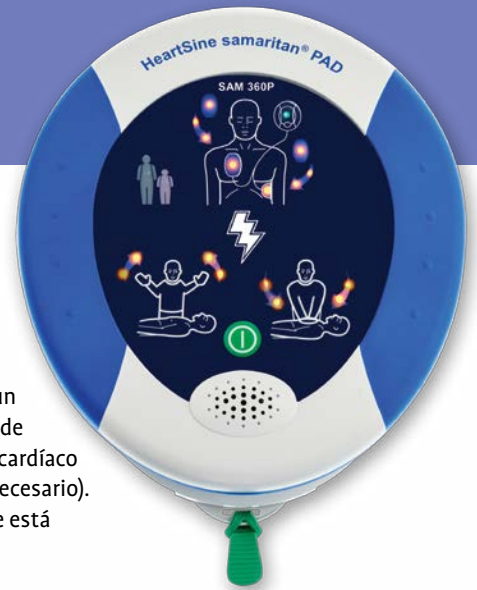


Compacto en tamaño, grande en capacidad

Portátil y liviano. El samaritan PAD 360P es más liviano (1,1 kg.) y pequeño que otros desfibriladores.

Duradero. El samaritan PAD 360P resiste los impactos y la vibración, y tiene calificación IP56, la calificación más alta de la industria en cuanto a protección contra el polvo y el agua. También incluye una garantía de diez años.

Tecnología avanzada. El samaritan PAD 360P utiliza tecnología de electrodos patentada por la compañía, un firmware (memoria fija) avanzado y estable, y tecnología bifásica SCOPE™* patentada por la compañía (una forma de onda creciente y de baja energía que se ajusta automáticamente a las diferencias de impedancia de cada paciente) para evaluar el ritmo y recomendar la desfibrilación de ser necesaria.

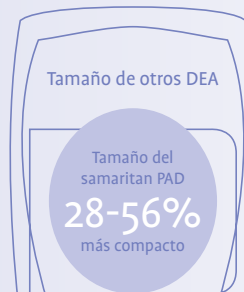

Tecnología avanzada que responde a las demandas de uso del mundo real. En HeartSine, nuestra innovación cambia vidas. Y salva vidas.

*La tecnología SCOPE™ (Self-Compensating Output Pulse Envelope) compensa automáticamente la energía, la pendiente y la curva de pulso del paciente.

Señales visuales y auditivas fáciles de entender

Fácil de usar. El samaritan PAD 360P proporciona mensajes visuales y auditivos fáciles de entender que pueden guiar al usuario durante el proceso, incluyendo asesoría en RCP.

Operación con un solo botón. El samaritan PAD 360P tiene solamente un botón: ENCENDIDO/APAGADO, lo que garantiza una operación sencilla para rescatistas con cualquier nivel de destreza.

Siempre listo. El Indicador de Preparación del Sistema parpadea para indicar que el sistema completo está en condiciones de servicio y listo para ser usado. El dispositivo realiza automáticamente una prueba de autocomprobación cada semana.



Indicaciones visuales para la colocación de electrodos



Permanezca alejado del paciente



Es seguro tocar al paciente

Economía real para el mundo real

Dos piezas, una sola fecha de vencimiento. El cartucho Pad-Pak™ combina la batería con las almohadillas de electrodos, lo que significa que sólo hay una fecha de vencimiento para controlar.

Bajo costo. El cartucho Pad-Pak, con una vida útil de cuatro años desde la fecha de fabricación, ofrece un ahorro significativo en relación con otros desfibriladores que necesitan unidades de batería y almohadillas separadas.



Pad-Pak y Pediatric-Pak con electrodos pre-colocados.

La inteligencia integrada del PAD y el exclusivo Pad-Pak pediátrico de HeartSine garantizan que las descargas tengan el nivel de energía adecuado para los niños.

